A woman with long blonde hair, wearing a white strapless dress, stands in a lush green forest. She is adorned with a floral garland around her waist. The scene is filled with soft, glowing light and numerous small white sparkles, creating a magical atmosphere. The background is a dense forest with green foliage and some purple flowers.

Zagęszczenie
i odbudowa
skóry

Redensity [I]

BEAUTY BOOSTER



TEOXANE


THE EXCELLENCE OF SWISS SCIENCE

Wszyscy mówią o kwasie hialuronowym! Ale jak on dokładnie działa?

Kwas hialuronowy, który naturalnie występuje w naszym organizmie, odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu skóry w dobrej kondycji. Ten podstawowy komponent skóry zatrzymuje wodę jak gąbka, zachowując tym samym odpowiedni poziom jej nawilżenia.

WRAZ Z UPŁYWEM CZASU SKÓRA SIĘ ZMIENIA

Główne przyczyny starzenia się skóry to nadmiar utleniaczy (wolnych rodników)* i stopniowa utrata obecnego w skórze kwasu hialuronowego.

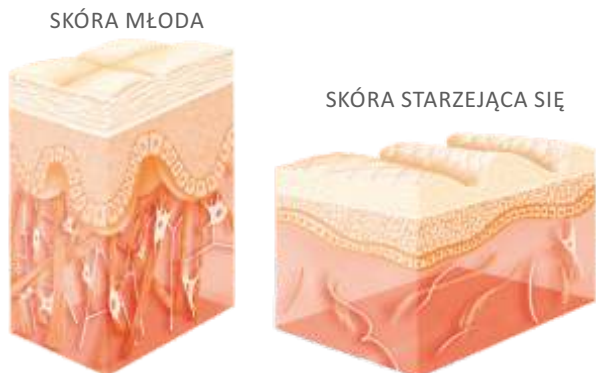

Starząc się, tracimy do 2/3 naszej rezerwy kwasu hialuronowego¹. W wieku 35 lat grubość skóry zmniejsza się średnio o 22%².

Tracąc grubość, skóra staje się bardziej delikatna, mniej nawodniona i mniej sprężysta.

Podobnie jak jabłko, które wysycha, skóra pozbawiona źródeł nawilżenia będzie wraz z wiekiem tracić swój blask i sprężystość.

Na wygląd i stan skóry wpływa: niezdrowy styl życia, np. niebilansowana dieta, palenie papierosów, promieniowanie UV.

Proces ten jest odwracalny! Pomimo, że nasza skóra się zmienia, możemy przywrócić jej piękno!

DZIAŁANIE PROFILAKTYCZNE

Iniekcje kwasu hialuronowego zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się skóry, przywracają twarzy blask i młodszy wygląd³.

DZIAŁANIE STYMULUJĄCE

Iniekcje kwasu hialuronowego uzupełniają naturalną utratę tej substancji i stymulują produkcję kolagenu⁴, który pomaga:



Iniekcje z kwasem hialuronowym pozwalają odsunąć w przyszłość inwazyjne zabiegi chirurgiczne⁵.

Około 80% oznak starzenia się skóry twarzy można przypisać ekspozycji na promienie UV⁶.

Redensity [I]

BEAUTY BOOSTER

Opóźnia pojawienie się pierwszych zmarszczek

Twoja skóra zaczyna się zmieniać? Chcesz, aby nadal była jędrna, nawilżona i piękna?

Chroń ją i stymuluj z Redensity [I].⁷

UNIKALNA, OPATENTOWANA FORMUŁA

Połączenie naturalnego i wolnego kwasu hialuronowego w wysokim stężeniu oraz substancji naturalnie występujących w skórze takich jak: antyoksydanty, aminokwasy, minerały i witaminy.

NAWILŻENIE
KWAS HIALURONOWY
ARGININA

OCHRONA ANTYOKSYDACYJNA
KWAS HIALURONOWY
GLUTATION, N-ACETYLO-L-
CYSTEINA, KWAS ALFA-LIPONOWY



ODBUDOWA TKANKI I REGENERACJA KOMÓRKOWA
KWAS HIALURONOWY
LEUCYNA, IZOLEUCYNA, WALINA, GLICYNA, LIZYNA,
TREONINA, PROLINA, WITAMINA B6, CYNK, MIEDŹ

Redensity [I] jest płynnym żelem na bazie nieusieciowanego kwasu hialuronowego, dzięki czemu można go podawać **na wybranych obszarach** za pomocą **mikroiniekcji**.

TEOSYAL Redensity®[I] jest produktem należącym do linii TEOSYAL® PureSense (wyrób medyczny, klasa III, oznakowanie CE) przeznaczonym wyłącznie dla przedstawicieli zawodów medycznych.

Wygładzanie dojrzałej skóry

Czy Twoja skóra jest bardziej pomarszczona i cieńsza niż dawniej? Czy chciałabyś przedłużyć i udoskonalić efekt wypełnienia?

Spraw, aby Twoja skóra była bardziej nawilżona i zagęszczona dzięki Redensity [I].


KIEDY I GDZIE NALEŻY STOSOWAĆ PREPARAT?⁸

W zależności od potrzeb i kondycji skóry lekarz zaleci indywidualny protokół zabiegowy.

Redensity [I] można stosować:

- Regularnie jako terapię podstawową w celu przeciwdziałania starzeniu się skóry
- Na przemian z innymi terapiami lub jako ich uzupełnienie
- W określonych sytuacjach, aby nawilżyć skórę i nadać jej blask (np. przed/po długiej ekspozycji na działanie słońca...)

Przeznaczony do twarzy, szyi i dekoltu.

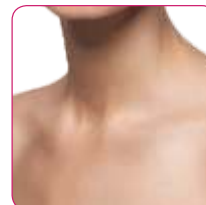

Aby osiągnąć optymalny efekt zalecana jest realizacja pełnego protokołu, co pozwala na wydłużenie efektów terapii i uzyskanie długofalowej poprawy:

- Pełna terapia: 3 sesje w trzytygodniowych odstępach, aby uzyskać natychmiastowy efekt i intensywną stymulację
- Terapia utrwalająca uzyskane efekty: zazwyczaj sesja 2-3 razy w roku lub stosownie do indywidualnych potrzeb.

Redensity [I]

BEAUTY BOOSTER

Poprawa jakości skóry*...

... satysfakcja pacjentek*

POPRAWA:

BLASK SKÓRY
+60%

SPRĘŻYSTOŚĆ
+56%

STRUKTURA
+59%

NAWILŻENIE
+61%

«Mam wrażenie, że moja twarz jest bardziej jędrna, a skóra wypełniona. Czuję się ze sobą lepiej.»
Anna, 35

91.7%

PACJENTEK
BYŁO USATYSFAKCJONOWANYCH
TERAPIĄ

91.7%

JEST GOTOWYCH
POWTÓRZYĆ TERAPIĘ

90.3%

POLECİŁOBY
TERAPIĘ INNYM

«Moja skóra od razu odzyskała, zdrowy blask, wszyscy mi to mówili.»
Olga, 53

«Efekt jest bardzo naturalny i właśnie tego oczekiwałam.»
Lisa, 47

«Redensity [I] jest jak super krem, który ujędrnia skórę od środka. Efekty są natychmiastowe i utrzymują się przez długi czas.»
Peggy, 42

* Raport z badania Teosyal® PureSense Redensity [I], Dr Knoll, Dr Vivier, Dr Carre, Dr Micheels, maj 2013. Wyniki oceny przez lekarza w zakresie ogólnej poprawy estetycznej twarzy dokonane 9 miesięcy po pierwszej iniekcji. Cały protokół obejmował 3 sesje, podczas których dokonywano iniekcji,

w trzytygodniowych odstępach. Badanie ujawniło bardzo dużą tolerancję skóry na terapię. Odnotowanymi skutkami ubocznymi w przypadku iniekcji twarzy była przejściowa wysypka, natomiast w przypadku iniekcji twarzy, szyi i dekoltu przejściowa wysypka, ból, sińce i swędzenie w miejscu iniekcji.



TEOSYAL PureSense
Redensity [1]

ZAGĘSZCZENIE I ODBUDOWA SKÓRY

CO DZIEJE SIĘ W TRAKCJE SESJI?

- Podczas sesji, za pomocą bardzo cienkiej igły, wykonywane są śródskórne lub podskórne mikroiniekcje z wprowadzeniem bardzo małych ilości Redensity [I] wzdłuż linii zmarszczek i równomiernie na całej skórze twarzy. W ten sposób kwas hialuronowy i substancje odżywcze zawarte w Redensity [I] trafiają w „samo serce” skóry.
- Iniekcje mogą być wykonywane „manualnie” za pomocą strzykawki i igły lub „ze wsparciem elektronicznym” zapewniającym większy komfort (np. Teosyal® Pen).
- Jedna sesja trwa ok. 20 minut.

CZY PO SESJI BĘDĘ MOGŁA NATYCHMIAST WRÓCIĆ DO PRACY?

W miejscu wykonania iniekcji może być odczuwalny nieznaczny dyskomfort, mogą pojawić się małe podskórne grudki*. Te dolegliwości ustępują zazwyczaj wkrótce po iniekcji.



* Potencjalnie mogą wystąpić inne skutki uboczne związane ze stosowaniem tego wyrobu bezpośrednio po iniekcji lub jakiś czas później. Są to m. in. obrzęk, rumień, zaczerwienienie i grudki. Pacjentka powinna powiadomić lekarza o wszelkich

TEOSYAL®PEN jest wyposażonym w silnik bezprzewodowym urządzeniem do iniekcji kwasu hialuronowego w celu korekcji zmarszczek i bruzd. Ten wyprodukowany przez Juvaplus SA wyrób medyczny (klasa IIa) jest regulowanym

CZY EFEKTY WIDAĆ NATYCHMIAST?

Efekty są widoczne natychmiast podczas pierwszej sesji. Skóra ma ładniejszy kolor, jest mniej pomarszczona, lepiej nawilżona i staje się bardziej jędrna. Z sesji na sesję cera jest bardziej promienista a skóra bardziej sprężysta.

CZY KONIECZNE SĄ ŚRODKI PRZECIWBÓLOWE?

Mikroiniekcje są płytkie i wykonywane za pomocą bardzo cienkiej igły. Redensity [I] zawiera lidokainę, która jest substancją znieczulającą miejscowo, powszechnie stosowaną na całym świecie. Dla jeszcze większego komfortu można przed zabiegiem zastosować krem znieczulający.

JAK DŁUGO UTRZYMUJE SIĘ EFEKT?

Kwas hialuronowy jest cząsteczką, ulegającą wchłonięciu, dlatego efekty jego działania są tymczasowe i uzależnione od wielu czynników, np. rodzaju skóry, wieku, obszaru poddawanego zabiegowi, technice iniekcji itp.

Aby osiągnąć optymalny efekt zalecana jest realizacja protokołu wstępnego obejmującego 3 sesje i utrwalającego uzyskane efekty 2-3 razy w roku.

skutkach ubocznych innych niż te wymienione powyżej oraz o wszelkich skutkach ubocznych utrzymujących się dłużej niż tydzień.

urządzeniem opatrzonym zgodnie z przepisami oznakowaniem CE (CE0434). Więcej informacji można uzyskać od lekarza lub po zapoznaniu się z instrukcją użycia TEOSYAL®PEN.

TEOXANE Laboratories z siedzibą w Genewie specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji preparatów na bazie kwasu hialuronowego wykorzystywanych w medycynie estetycznej.

TEOSYAL PureSense Redensity [I] BEAUTY BOOSTER

Teosyal® PureSense Redensity [I] jest preparatem zalecanym w celu przeciwdziałania oznakom starzenia oraz poprawy nawilżenia skóry twarzy, szyi i dekoltu. Jego główne składniki to kwas hialuronowy (15mg/ml) i chlorowodrek lidokainy (3mg/g). Teosyal® PureSense Redensity [I] to produkt leczniczy podlegający regulacjom (wyrób medyczny klasy III, CE 0086). Więcej informacji można uzyskać od lekarza.

References :

1. Labat-Robert J. et al. Aging of the extracellular matrix. *Médecine & Longévité*. 2012 March; 4(1): 3-32.
2. Farage MA, Miller KW, Elsner P, Maibach HI. Characteristics of the Aging Skin. *Adv Wound Care (New Rochelle)*. 2013 Feb;2(1):5-10.
3. Baspeyras M, et al. Clinical and biometrological efficacy of a hyaluronic acid-based mesotherapy product: a randomised controlled study. *Arch Dermatol Res*. 2013 Oct;305(8):673-82.
4. Anderegg U, et al. More than just a filler - the role of hyaluronan for skin homeostasis. *Exp Dermatol*. 2014 May;23(5):295-303.
5. Data from SNDV (Syndicat National des Dermatologues-Vénérologues)
6. Papakonstantinou E, et al. Hyaluronic acid: A key molecule in skin aging. *Dermatoendocrinol*. 2012 Jul 1;4(3):253-8.
7. Data from AFME (Association Française de Médecine morpho-Esthétique et anti-âge)
8. Teosyal® Puresense Redensity [I] instructions for use.

500310/00 October 2015